

# **Лампа Вуда DE-2015**

## **Руководство пользователя**



**Настоящее руководство ознакомит пользователя с функциями и элементами управления устройством. Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

## Характеристики:

Габариты: 240 x 100 x 34 мм (Д x Ш x В)

Диаметр линзы: 50 мм

Источники света: LED светодиоды белого цвета и ультрафиолетовые.

Длина волны ультрафиолетового излучения: 365 нм

Интенсивность излучения: UVA: 1.5~10.0mW/cm<sup>2</sup>


Емкость аккумулятора: 2000 мАч

Режим зарядки: Type-C/5V1A

Время работы: 2-6 часов

## Конструкция:

1. 4.5x линза
2. Источник света
3. Передняя крышка
4. Задняя крышка
5. Индикатор работы
6. Логотип
7. Переключатель ультрафиолет/белый свет
8. USB-разъем

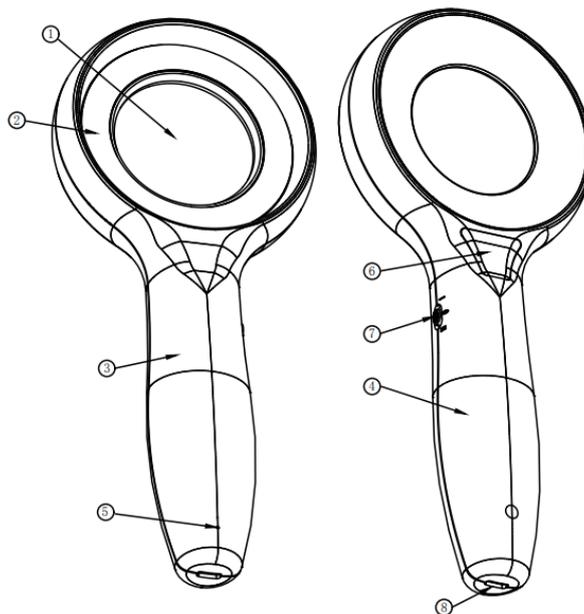

## Назначение:

Лампа Вуда – инструмент для визуального обследования кожных покровов животных на предмет выявления бактериальных и грибковых кожных инфекций животных.

## Применение:

1. Выберите подходящее место для проведения обследования: Лампа Вуда должна эксплуатироваться в слабоосвещенном помещении. Качество визуализации кожных заболеваний может быть ниже при естественном и комнатном освещении.
2. Устранение помех: Старайтесь избегать любых отражающих или флуоресцентных предметов вокруг, удалите следы перевязочных материалов, оставшиеся на коже в месте осмотра.
3. Подготовка перед проведением обследования: Для обеспечения стабильного и непрерывного светового потока, лампу следует предварительно прогреть, включив прибор, в течение 1 минуты перед использованием.
4. Расстояние осмотра: Рабочее расстояние между лампой и наблюдаемыми поражениями кожи должно составлять около 10 см. Если лампа расположена слишком близко, то в центре зоны наблюдения образуется темное пятно, а если слишком далеко, то флуоресцентное изображение не будет четким.

**\*Нет необходимости очищать кожные покровы перед использованием. При осмотре морды, необходимо закрыть глаза животного, чтобы избежать повреждения органов зрения.**

**\*Обязательно зарядите инструмент перед первым использованием.**

## Предупреждение:

- Не используйте во влажной, легковоспламеняющейся и взрывоопасной среде.
- Не смотрите прямо на источник света в течение длительного времени.

- Время непрерывного облучения определенной области не должно превышать 1 минуты.
- Храните прибор в недоступном для младенцев и детей младшего возраста месте.
- Не допускайте, чтобы изделие подвергалось сильным ударам или вибрации.
- Запрещено вносить изменения в конструкцию или осуществлять ремонт изделия не сертифицированным специалистом на весь срок гарантии.

**Гарантия:**

Срок гарантии на изделие составляет 12 месяцев. Следующие неисправности не являются гарантийными:

1. Разбор прибора, внесение конструктивных изменений в конструкцию не сертифицированным специалистом.
2. Повреждение в результате падения или обработки химически-активными веществами.
3. Необоснованное техническое обслуживание.
4. Несоблюдение предписаний, указанных в данном руководстве.