

Электронные весы для животных весом до 200 кг

Важно:

1. Используйте весы на жесткой, ровной поверхности.
2. Избегайте воздействия сильного электрического и магнитного поля.
3. Не используйте в зонах с большими перепадами температур.
4. Для чистки использовать мягкое моющее средство.
5. Не разбирайте устройство, это приведет к его повреждению и прекращению гарантийных обязательств.

Требования к электропитанию:

Весы работают от 4 батареек типа AA (не входят в комплект) или от адаптера (входит в комплект). Если весы не используются более месяца, необходимо вынуть все батарейки из блока управления весами.

Кнопки управления:

1. ON/OFF: кнопка для включения (ON) и выключения (OFF) весов.
2. MODE: кнопка для изменения единицы измерения веса kg → lb → oz → lb-oz, а также для рекалибровки весов.
3. TARE: Кнопка для учета веса тары.
4. HOLD: кнопка для сохранения значения взвешивания (значение взвешивания не фиксируется автоматически).
5. C/R: Кнопка, для переключения вариантов взвешивания.

6. PCS: Кнопка для включения функции подсчета количества.

Взвешивание:

1. Нажмите «ON/OFF» для включения весов. Как только на экране появится 0.00, весы готовы к использованию.
2. Нажмите «MODE» для установки единицы измерения веса: kg → lb → oz → lb-oz
3. Нажмите «TARE», чтобы вычесть вес контейнера-переноски/тары, восстановите показания до нуля.
4. Нажмите «HOLD» для сохранения значения взвешивания.
5. Нажмите «C/R» для изменения грузоподъемности весов.
6. Для подсчета количества включите весы нажатием «ON/OFF», нажмите «PCS». На экране высветится «0 рс». Нажмите «PCS» повторно, на экране отобразится: РС 25 – эквивалентно 25 единицам. (повторные нажатия позволят переключать кратность на 50 и 100 единиц соответственно). Поместите 25 единиц взвешиваемых предметов на середину платформы, форма и вес таких 25 единиц должны быть одинаковым (но общий вес всех предметов не превышает предела взвешивания). Нажмите кнопку «PCS» еще раз, для завершения формирования расчетной формулы. В памяти весов сохранится вес 25 единиц. После взвешивания весы будут рассчитывать количество

единиц в коробке исходя из расчета вес / 25 (или в зависимости от выбора режима на 50 или 100), что будет отображать количество единиц в одной упаковке.

Калибровка:

Все модели весов калибруются на заводе перед отправкой, однако со временем, из-за перепадов температур и влажности, могут появиться неточности, в этом случае необходимо повторно откалибровать весы.

Как провести калибровку:

Когда весы выключены, удерживайте кнопку ON/OFF до появления индикации: «PE xxx», отпустите кнопку и сразу же одновременно нажмите кнопки ON/OFF и MODE до появления надписи: «E – 100». Повторное нажатие кнопки MODE покажет: E - 50, E - 25, E - 10, E - 5. Поместите стандартный калибровочный груз на середину платформы в соответствии с цифрой на дисплее (например: E - 10, поместите 10-килограммовый калибровочный груз), ожидайте пока на дисплее не появится надпись: "GOOD". Калибровка закончена.

Важно: чем больше вес для калибровки используется, тем выше будет точность весов после калибровки

Возможные проблемы:

На экране высветился индикатор “Н” – это означает, что на весы установлен слишком большой вес (перегрузка).

На экране высветился индикатор “Е” – это означает, что заряда батареек недостаточно, требуется заменить батарейки или использовать адаптер для подключения к электросети.

Технические характеристики

Модель	Режим взвешивания	Допустимая погрешность г на кг веса животного
PCR-2126	До 60 кг	До 20 г
	До 120 кг	До 50 г
	До 200 кг	До 100 г