

Термометр ветеринарный для крупных животных

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Применение:

1. Включите термометр, нажав на кнопку ON/OFF. При включении термометра раздастся звуковой сигнал, после чего он готов к измерению температуры.
2. Вставьте наконечник зонда в анальное отверстие животного.
3. В течение 30 секунд термометр издаст звуковой сигнал и на экране будет отображен результат измерения температуры.
4. После 2 минут бездействия термометр автоматически отключится.
5. Пока термометр выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, пока не появится надпись Lo°C или Lo°F, затем отпустите кнопку.

Технические характеристики:

- Быстрое измерение температуры
- Звуковая индикация
- ЖК-дисплей и отображение последнего измерения
- Доступные единицы измерения °C и °F
- Простота эксплуатации

Подходит для собак, кошек, свиней, крупного рогатого скота.

- Диапазон измерений: 32.00 ~ 42.99°C (90.00~109.99°F)
- Точность:
+/-0.1°C между 35.00°C и 39.00°C
+/-0.2°F от 95. 00°F до 102. 20°F
+/-0. 2°C ниже 35. 00°C или выше 39. 00°C
+/-0. 4°F ниже 95. 00°F или выше 102. 20°F
- Тип батарей: 2* 1,5 В (AAA)
Срок службы батареи около 5000 измерений
- Размеры: 200*110*35 мм