



ИНСТРУКЦИЯ

по применению

ГЕЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ЛУБРИВЕТ VitaVet PRO™

для родовспоможения и диагностических,
ветеринарно-зоотехнических, гигиенических манипуляций

ТУ 20.59.59-016-84930661-2020

СОГЛАСОВАНО:

Директор по развитию
Титов С. Г.

УТВЕРЖДЕНО:

Директор ООО «АГРО»
Золотов Д. Н.

Дата создания инструкции: 7.12.2023

Дата последней ревизии:



ИНСТРУКЦИЯ

по применению

ГЕЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ЛУБРИВЕТ VitaVet PRO™

для родовспоможения и диагностических,
ветеринарно-зоотехнических, гигиенических манипуляций

ТУ 20.59.59-016-84930661-2020

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Гель ветеринарный для родовспоможения
Лубривет VitaVet PRO™
ТУ 20.59.59-016-84930661-2020

Производитель: ООО «АГРО»
150030, Российская Федерация, г. Ярославль,
ул. Пожарского, д. 9, литера А-Н, пом. 24.
Тел.: +7 (4852) 287-796, 8 800-700-30-97

2. Общие сведения

Гель ветеринарный Лубривет VitaVet Pro™ обеспечивает увеличение скольжения между трущимися поверхностями при родовспоможении, искусственном осеменении, проведении диагностических, ветеринарно-зоотехнических и гигиенических манипуляций.

Форма выпуска: пластиковые канистры по 5 литров, флаконы различной фасовки от 250 мл до 1 литра.

3. Состав

Вода деионизированная, пропиленгликоль, загуститель, функциональные добавки.

ПРОДУКТ В СОСТАВЕ НЕ СОДЕРЖИТ СИЛИКОН.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

ГЕЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ЛУБРИВЕТ VitaVet PRO™

для родовспоможения и диагностических,
ветеринарно-зоотехнических, гигиенических манипуляций

ТУ 20.59.59-016-84930661-2020

4. Физико-химические свойства

Продукт представляет собой густой однородный экстра скользкий гель прозрачного цвета на водной основе, обеспечивающий длительное скольжение и увлажнение. Гель не растекается, после нанесения на поверхность полного высыхания продукта не наблюдается. Благодаря нейтральному значению pH гель не раздражает кожу и слизистые оболочки.

Лубривет VitaVet PRO™ совместим с акушерскими перчатками из полиэтилена, латекса и нитрила, легко наносится и хорошо смывается водой. Благодаря содержанию пропиленгликоля гель обладает небольшим бактерицидным эффектом, смягчает кожу, уменьшает отёчность. Допускается образование пузырьков воздуха в геле, что не влияет на качество и эффективность продукта.

5. Порядок применения

Гель ветеринарный Лубривет VitaVet PRO™ применяют наружно и местно:

- при проведении родовспоможения;
- при проведении ультразвукового исследования;
- для лучшего скольжения при проведении ректального обследования и искусственного осеменения, с целью уменьшения раздражения и болезненных ощущений у животных;
- для обработки рук и перчаток специалиста при выполнении требуемых процедур;
- для обработки ветеринарного инструментария (акушерские инструменты, зонды, катетеры и т.д.)

При использовании средства доза определяется ветеринарным специалистом в зависимости от вида манипуляции. При необходимости гель смывается водой или удаляется бумажной салфеткой.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

ГЕЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ЛУБРИВЕТ VitaVet PRO™

для родовспоможения и диагностических,
ветеринарно-зоотехнических, гигиенических манипуляций

ТУ 20.59.59-016-84930661-2020

6. Меры предосторожности

Противопоказания к применению не выявлены.

Продукт пожаровзрывобезопасен.

При применении геля следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с гигиеническими средствами.

При попадании в глаза промыть водой.

Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу.

По окончании работы руки следует вымыть тёплой водой с мылом.

При случайном попадании геля в организм человека или появления аллергических реакций следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению средства или этикетку).

Не рекомендуется применять при индивидуальной непереносимости компонентов.

7. Срок годности и условия хранения

Срок годности: 36 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Хранить в местах, недоступных для детей. Хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищённом от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5°C до +25°C.

Не замораживать. Не использовать по истечении срока годности.

Пустые упаковки из-под геля ветеринарного Лубривет VitaVet PRO™ запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

В случае сильного загустения продукта в процессе хранения возможно разбавление водой при условии качественного перемешивания до однородности смеси.