

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕСТ НАБОРА ВЮ К 306



ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОГЕНОВ В ФЕКАЛИЯХ ТЕЛЯТ



1. Отберите образец фекалий непосредственно из ануса телёнка. Если образцы жидкие, отберите одну полную мерную ложку.



2. Если образцы твердые, удалите избыточное количество шпательем.



3. Растворите пробу в жидкости из тестовой пробирки.



4. Взболтайте тестовую пробирку, чтобы добиться однородности.



5. Слегка постучите доньшком тестовой пробирки по твердой поверхности, чтобы вся жидкость оказалась на дне пробирки.



6. Вскройте упаковку из фольги, достаньте колбу с тест полосками. После извлечения из упаковки, используйте тест полоски как можно скорее, поскольку вне упаковки они быстро теряют свои свойства, особенно при повышенной влажности.



7. Вставьте тестовую пробирку внутрь колбы с тестами.



8. Закрутите колпачок колбы с тестами. Вы должны услышать два отчетливых раздельных щелчка, вызванных проколами дна и крышки тестовой пробирки. Поставьте колбу с тестами на ровную поверхность в вертикальном положении на 10 минут: Жидкость из тестовой пробирки перетечёт в колбу с тестами и плавно проникнет в тестовые полоски.





9. Иногда, особенно в случае если жидкость в тестовой пробирке не достаточно однородна, движение жидкости по одной или нескольким полоскам может прекратиться. В этом случае необходимо легко постучать доннышком колбы с тестами по твердой поверхности, чтобы жидкость снова начала проникать в тест полоски.



10. По истечении 10 минут следует снять показания тест полосок используя рис. 11 в качестве стандарта. Для определения Clostridium perfringens используется стандарт на рис. 12. Если верхней полоски нет, результаты тестирования считаются недостоверными.

Для теста на Clostridium perfringens

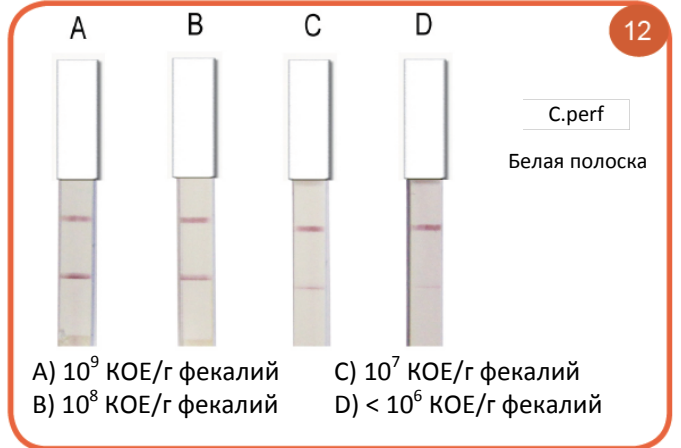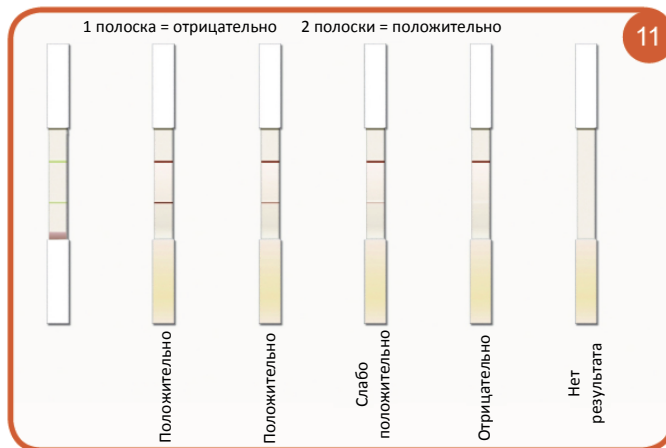

Цвета полосок:



Меры предосторожности и рекомендации по использованию

- Тесты следует хранить в сухом месте при комнатной температуре
- При проведении тестирования одевать одноразовые перчатки
- Жидкость в тестовой пробирке не должна быть слишком концентрированной. Количество фекалий в тестируемом образце не должно превышать одной полной мерной ложки.
- Использованный набор для тестирования утилизировать в соответствии с действующим законодательством в области защиты окружающей среды и обороту биологических отходов.