

ДРЕНЧЕР DRENCH-MATE I

система для быстрого закачивания жидких препаратов в рубец КРС с целью профилактики парезов, кетозов, ацидозов, смещения сычуга.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Однократная доза – 24 литра.
- Простая регулировка расхода вещества.
- Красная метка указывает глубину ввода шланга в рубец.
- Мембранный насос большого объема для быстрой закачки вязких продуктов.
- Изготовлен из нержавеющей стали и высококачественного пластика.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

1. Откройте крышку, повернув ее против часовой стрелки. Заполните ведро подготовленным раствором для вливания. Тщательно перемешайте.
2. Вставьте фрикционную трубку в ротовое отверстие и прикрепите носовой фиксатор в ноздри.
3. Продвигайте шланг через фрикционную трубку в рубец. Поверните блокиратор, чтобы предотвратить проскальзывание шланга. Красная метка указывает приблизительную глубину введения шланга (для зрелой коровы голштинской породы).
4. Убедитесь, что шланг находится в рубце (запах содержимого рубца, отсутствие движения выдыхаемого воздуха из шланга).
5. Прикрепите фитинг к кулачковому замку насоса. Начните закачку; используйте весь раствор для вливания. Наклоните ведро к концу процесса закачки для полного закачивания раствора. Если вы видите, что корова НЕ жуёт, вам нужно остановить перекачку, так как это может привести к рефлюкс-жидкости рубца в легкие.
6. Отсоедините шланг от насоса и удерживайте высоко в течение 10 секунд, чтобы оставшаяся жидкость стекала. Удалите оставшуюся жидкость из шланга. Разблокируйте фрикционную трубку и осторожно извлеките шланг. Затем снимите фрикционную трубку. Прополощите всю систему чистой питьевой водой после использования.

