

# Руководство пользователя

## Стол ветеринарный VET-5030/VET-5040 с электроприводом



*VitaPet.*  
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ  
В МАЛЕНЬКИХ СЕРДЦАХ

2025 г.

## Уважаемый покупатель!

Команда бренда VitaVet Pro благодарит вас за доверие и выбор нашей продукции. Мы искренне надеемся, что использование нашего оборудования будет надежной опорой для вас при работе с пациентами. Для более комфортного и длительного использования рекомендуем вам ознакомиться с памяткой по уходу за изделием, которое находится на странице 4 данного руководства пользователя.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Стол ветеринарный VET-5030/VET-5040 с V-образной столешницей и регулировкой по высоте от 60 см до 105 см выполнен из стали и может использоваться для хирургических операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ. V-образная столешница позволяет фиксировать животное в удобном положении, а также является незаменимой для проведения сложных операций. Стол VET-5030/VET-5040 обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного хирурга при проведении операций за счет функционального оснащения стола. V-образная столешница регулируется электроприводами по высоте от 60 до 105 см и по наклону от 0° до 45°. Управление электроприводами осуществляется с ножного пульта. Стол отлично подойдет для хирургических операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Параметры	
Длина столешницы, мм	1300	1400
Ширина столешницы, мм	600	600
Высота стола, мм	600 - 1050	600 - 1050
Регулировка наклона столешницы	0 - 45°	
Масса стола, кг	~ 65,5	~ 67,7

Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь
Материал каркаса	Металл с полимерно-порошковым покрытием
Управление	Ножное (педаль)
Потребляемая мощность	400 Вт / ~ 2 А

## **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

№	Наименование	Количество, шт
1	Стол ветеринарный VET-5030/VET-5040	1
2	Руководство пользователя	1

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ**

Изделие поставляется практически в собранном виде. Необходимо только выполнить ряд рекомендаций по сборке.

1. Распаковать изделие, провести осмотр товара на избежание брака конструкции, комплектности.
2. Установить стол на горизонтальную поверхность, выровнять опоры стола при необходимости.

## Памятка по уходу за поверхностями из нержавеющей стали

Необходимо помнить, что все стали, включая стали с пометкой stainless **не являются абсолютно нержавеющей** могут быть подвержены разрушению **в агрессивных средах**. Вы видите пятна на столешнице из нержавеющей стали после ее очистки? Вероятнее всего эти пятна вызваны едким чистящим средством. Нержавеющую сталь необходимо содержать в чистоте и проводить профилактическую обработку для сохранения внешнего вида, проведения регулярной и генеральной уборки и конечно же для сохранения коррозионной стойкости.

Нержавеющая сталь покрыта толстым слоем оксида хрома, который защищает материал от коррозии, но этот **защитный слой все равно нуждается в защите**. Если вы не чистите ее регулярно, загрязнения будут задерживать коррозионные агенты и уменьшать защиту, которая предотвращает коррозию. Ключевым моментом является очистка с использованием правильных чистящих средств.

### КАК ПРОВОДИТЬ ЧИСТКУ СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ?

Проводить очистку столешницы из нержавеющей стали можно с помощью **воды, неабразивного и не содержащего хлор моющего средства**. Для базовой очистки теплой воды смешанную **с мягким нейтральным моющим средством** достаточно. Обязательно используйте **мягкую безворсовую ткань**. Дезинфекцию можно проводить **70% изопропиловым спиртом (ИПС) или же иными средствами не содержащими абразив и соединения хлора**.

**Растворы хлора могут удалить защитный слой оксида хрома с поверхностей из нержавеющей стали что и станет причиной возникновения коррозии.**

Возникшую коррозию можно удалить с помощью обработки нержавеющей стали раствором азотной или лимонной кислоты. Это удалит ржавчину и заставит защитный слой оксида хрома сформироваться снова. Хорошей идеей будет **добавить пассивацию к вашей регулярной процедуре очистки в качестве профилактической меры**. Это поможет предотвратить образование ржавчины и защитить ваши инвестиции в оборудование из нержавеющей стали.

Поставщик: ООО «ТК ЯРВЕТ»  
150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Победы, здание 22,  
строение 4  
Телефон: 8 (800) 700-30-97  
Email: [info@yarvet.ru](mailto:info@yarvet.ru)

Производитель: ООО «МПО МТП РУС»  
155523, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Д. Бедного, д. 31, офис 2