

Руководство пользователя

Стол ветеринарный VET-7010 с электроприводом стоматологический



*Vita*vet.
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ
В МАЛЕНЬКИХ СЕРДЦАХ

2025 г.

Уважаемый покупатель!

Команда бренда VitaVet Pro благодарит вас за доверие и выбор нашей продукции. Мы искренне надеемся, что использование нашего оборудования будет надежной опорой для вас при работе с пациентами. Для более комфортного и длительного использования рекомендуем вам ознакомиться с памяткой по уходу за изделием, которое находится на странице 4 данного руководства пользователя.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стол ветеринарный VET-7010 стоматологический обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста во время проведения стоматологических операций и вскрытия животных. Стол снабжен перфорированной сеткой с фиксацией по бокам, решетка выполнена из прутка 6 мм. Для слива предусмотрена раковина (176x325x150мм) нерж., а также установлен смеситель. Материал столешницы обладает высокой химической стойкостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Параметры
Длина столешницы, мм	1600
Ширина столешницы, мм	650
Высота стола, мм	400 – 950
Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	100
Материал рабочей поверхности	Нержавеющая сталь
Материал каркаса	Металл, покрытый порошковой эмалью
Потребляемая мощность	200 Вт / ~ 1 А
Управление электроприводом	Ножное (педаль)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Количество, шт.
1	Стол ветеринарный VET-7010	1
2	Раковина для слива	1
3	Руководство пользователя	1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Стол поставляется в упаковке практически в собранном виде с необходимой комплектацией.

1. Распаковать изделие, провести осмотр товара на избежание брака конструкции, комплектности.
2. Расположите стол на ровном горизонтальном месте, при необходимости выровняйте его при помощи регулируемых опор фиксаторов, компенсируя неровности пола.
3. Подключите электропривод стола к питанию. Отрегулируйте стол на необходимый для работы уровень.
4. Стол готов к работе.

Памятка по уходу за поверхностями из нержавеющей стали

Необходимо помнить, что все стали, включая стали с пометкой stainless **не являются абсолютно нержавеющей** могут быть подвержены разрушению **в агрессивных средах**. Вы видите пятна на столешнице из нержавеющей стали после ее очистки? Вероятнее всего эти пятна вызваны едким чистящим средством. Нержавеющую сталь необходимо содержать в чистоте и проводить профилактическую обработку для сохранения внешнего вида, проведения регулярной и генеральной уборки и конечно же для сохранения коррозионной стойкости.

Нержавеющая сталь покрыта толстым слоем оксида хрома, который защищает материал от коррозии, но этот **защитный слой все равно нуждается в защите**. Если вы не чистите ее регулярно, загрязнения будут задерживать коррозионные агенты и уменьшать защиту, которая предотвращает коррозию. Ключевым моментом является очистка с использованием правильных чистящих средств.

КАК ПРОВОДИТЬ ЧИСТКУ СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ?

Проводить очистку столешницы из нержавеющей стали можно с помощью **воды, неабразивного и не содержащего хлор моющего средства**. Для базовой очистки теплой воды смешанную с **мягким нейтральным моющим средством** достаточно. Обязательно используйте **мягкую безворсовую ткань**. Дезинфекцию можно проводить **70% изопропиловым спиртом (ИПС)** или же **иными средствами, не содержащими абразив и соединения хлора**.

Растворы хлора могут удалить защитный слой оксида хрома с поверхностей из нержавеющей стали что и станет причиной возникновения коррозии.

Возникшую коррозию можно удалить с помощью обработки нержавеющей стали раствором азотной или лимонной кислоты. Это удалит ржавчину и заставит защитный слой оксида хрома сформироваться снова. Хорошей идеей будет **добавить пассивацию к вашей регулярной процедуре**

очистки в качестве профилактической меры. Это поможет предотвратить образование ржавчины и защитить ваши инвестиции в оборудование из нержавеющей стали.

Поставщик: ООО «ТК ЯРВЕТ»
150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Победы, здание 22,
строение 4
Телефон: 8 (800) 700-30-97
Email: info@yarvet.ru

Производитель: ООО «МПО МТП РУС»
155523, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Д. Бедного, д. 31, офис 2