



Инструкция по монтажу тележки Р03 для ультразвукового оборудования EMP

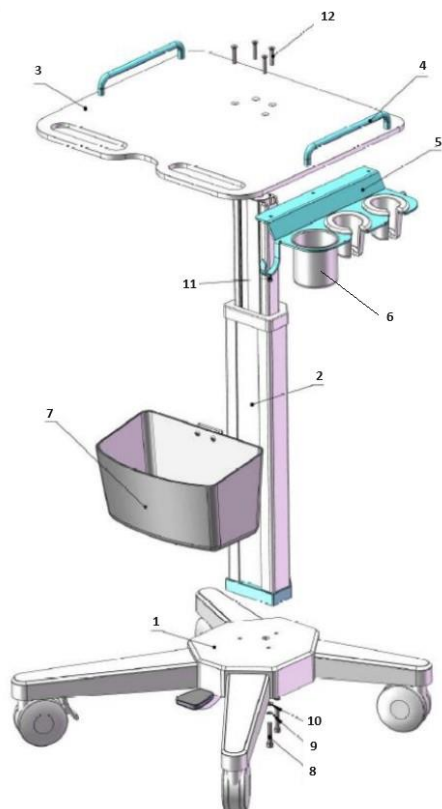

Общий вид и комплект поставки:


№	Деталь	Количество
1	Основание с колесным блоком	1
2	Стойка с подъемным механизмом	1
3	Столешница	1
4	Упоры для фиксации	2
5	Подвес для ультразвуковых датчиков	1
6	Основание для фиксации ультразвуковых датчиков	2
7	Пластиковая корзина	1
8	Болт	3
9	Пружинная шайба	3
10	Плоская шайба	3
11	Болт с крестообразной головкой	3
12	Крестовой болт с потайной головкой	4

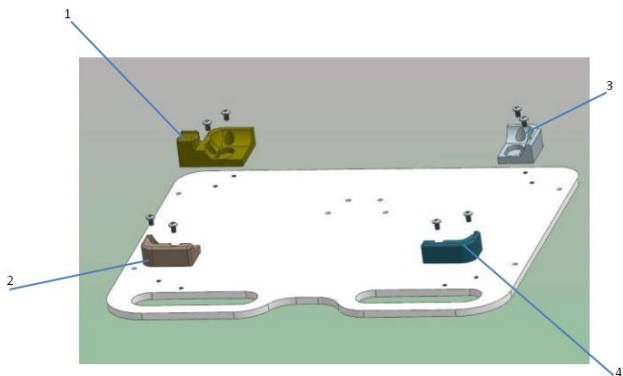


Комплект сборки основания для фиксации ультразвукового оборудования:

№	Деталь	Количество
Ножи для фиксации прибора на столешнице		
1	Левая задняя ножка	1
2	Левая передняя ножка	1
3	Правая задняя ножка	1
4	Правая передняя ножка	1
5	5*10 винт с круглой головкой	8


Шаг 1: соедините основание с колесным блоком и стойку с подъемным механизмом с помощью болтов с цилиндрической головкой M6*35, пружинных шайб и плоских шайб.

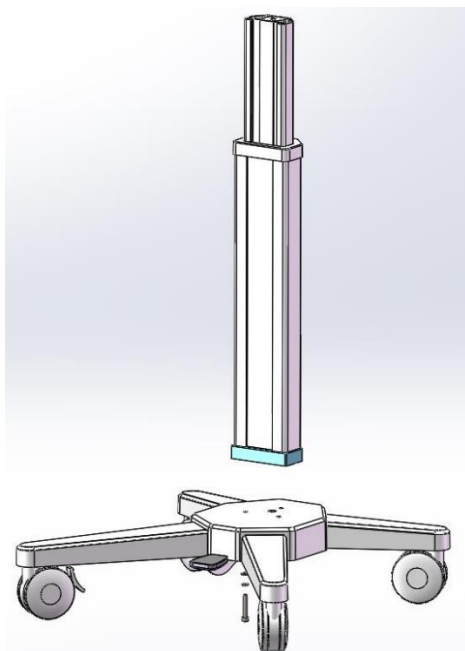


Шаг 2: закрепите столешницу на стойке с подъемным механизмом с помощью болтов с потайной головкой M5*25

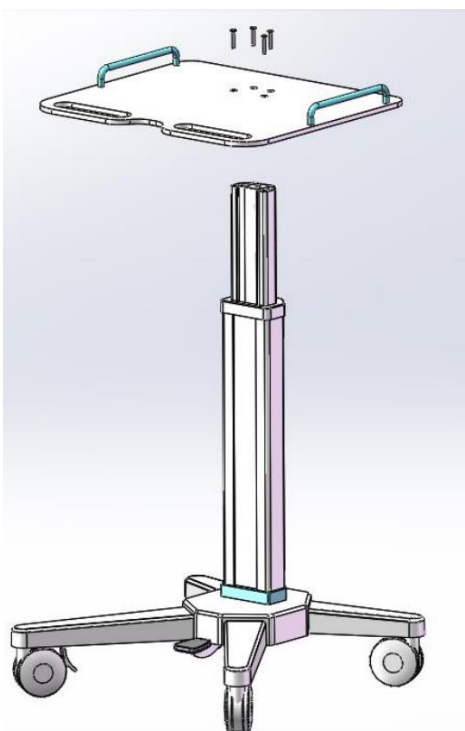

Шаг 3: Вставьте скользящий блок на задней стороне пластиковой корзины в паз на стойке с подъемным механизмом и затяните болты;

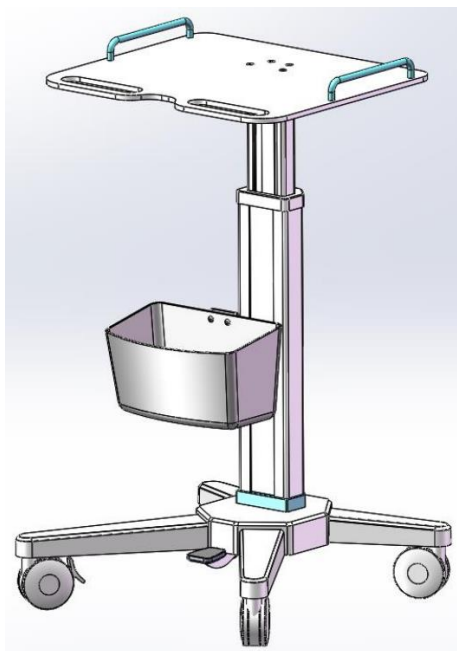


Шаг 4: с помощью болтов М5*8 прикрепите подвес для ультразвуковых датчиков к нижней стороне столешницы.

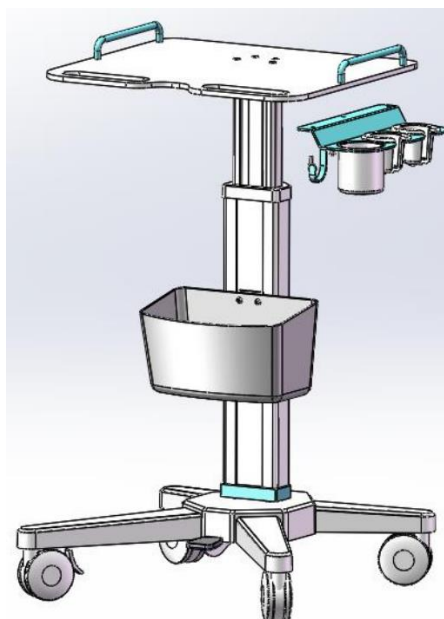

Шаг 5: Крепление разъема для подключения трех датчиков

1. Зафиксируйте заднюю панель четырьмя винтами (8*12) на задней панели

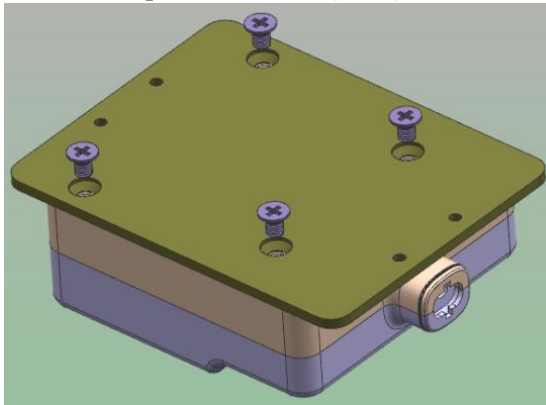

2. Вставьте два ползуна в пазы внешней стойки, а затем зафиксируйте заднюю панель на ползуне четырьмя крестообразными винтами с большой плоской головкой (M5x8)



3. Наконец, поместите датчик в пластиковую рамку и уложите провода датчика.



Шаг 6: завершите сборку для ультразвукового оборудования проверив надежность всех соединений.

