

Термометр электронный ветеринарный для крупных животных
Модель: VET-160
VitaVet Pro

Руководство пользователя

Важно!

Не используйте термометр на местах ран или рубцов у животных.

Характеристики:

Диапазон измерения	32.0~43.9°C, 90.0~109.9°F
Шаг измерения	0.1°C, 0.1°F
Точность	±0.1°C (35.5°C ~ 40.0°C), ±0.2°F (95.9°F~104°F)
Память	Последнее измерение
Батарея	AAA (1,5V) 1 штука
Срок использования батареи	5000 измерений
Габариты	178,4мм x 99 мм x 16,5мм
Вес	55 грамм (включая батарею)
Условия эксплуатации	Диапазон температуры от +16°C до +35°C; Диапазон давления от 15% до 90%, Диапазон температуры от -25°C до 5°C и от +5 °C до 35°C
Условия хранения	Диапазон давления до 90%

Расшифровка символов и ошибок:

	Ошибка системы. Обратитесь к дистрибьютору.
	Температура выше диапазона измерения. Проведите повторное измерение.
	Температура ниже диапазона измерения. Проведите повторное измерение.
	Индикатор функции «Память».
	Низкий уровень заряда батареи. Если на дисплее отображается данный символ, то прибор больше не может проводить измерения. Замените батарею.
	Руководство по эксплуатации
	Производитель
	WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive, 2012/96/EU) Директива об отходах электрического и электронного оборудования 2012/96/EU. Утилизация данного устройства регламентируется национальными и местными регулирующими органами.
	Изделие соответствует экологическим стандартам RoHS Европейского союза.
	Внимание
	ММГГ: Номер лота обозначается как месяц (ММ) и год (ГГ) производства.
	Нет радиофармацевтического лекарственного средства.

Замена батареи:

- Когда вы видите на экране прибора символ , это обозначает что необходимо заменить батарею;
- Используйте острый предмет, такой как зубочистка, чтобы осторожно вынуть старую батарею.
Избегайте использования любых острых металлических предметов;
- Установите новую батарею



Внимание

1. Держите батареи питания в недоступном для детей месте. Не бросайте батарею в огонь, так как это может привести к взрыву;
2. Утилизируйте батареи согласно местному законодательству.

Предупреждения:

1. Не кипятите зонд/термометр и не подвергайте его мытью в посудомоечной машине. Подробности см. в инструкции по очистке;
2. Не роняйте термометр и не подвергайте его сильным ударам;
3. Хранить в недоступном для детей месте. Компоненты могут быть опасны при проглатывании. В этом случае немедленно обратитесь к врачу или в больницу;
4. Не храните термометр при экстремальных температурах, так как это может ухудшить его характеристики. Перед использованием дайте термометру естественным образом нагреться до комнатной температуры;
5. Прекратите использование термометра, если он работает с ошибками или если дисплей неисправен.

Применение:

1. Перед использованием продезинфицируйте зонд протерев его салфеткой, смоченной изопропиловым спиртом.
2. Нажмите и отпустите клавишу «ON/OFF». Дисплей прибора подтвердит готовность к работе прибора отобразив следующие символы: 
3. Дисплей отобразит символы L °C (°F), где °C (°F) мигающие. Если температура помещения выше, чем 32 °C, на экране будет отображаться комнатная температура, а не «L °C (°F)».
4. Установите зонд в положение для измерения. Термометр предназначен для ректального измерения температуры у крупных домашних животных, а также крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных.
5. Как только символ °C (°F) перестанет мигать, измерение окончено и дисплей отобразит значения температуры. Термометр так же издаст характерный звуковой сигнал извещение об окончании измерения.
6. Термометр автоматически выключится через 3 минуты. Тем не менее для увеличения срока службы батареи рекомендуется отключать термометр вручную используя кнопку «ON/OFF», после окончания измерения.

Специальные возможности:

1. Функция «Память» или отображение последнего измерения.
При нажатии кнопки «ON/OFF» для включения термометра удерживайте ее в течение примерно 5 секунд. На дисплее появится последнее измерение. Это значение будет отображаться до тех пор, пока кнопка удерживается нажатой. Когда кнопка будет отпущена, термометр перейдет в режим «готов к измерению», а последнее измерение будет стерто.
2. Переключение единиц измерения между °C и °F.
Для переключения между единицами измерения необходимо после включения термометра, в течении первых 5 секунд удерживать кнопку «ON/OFF» в течении 2 секунд. После следующего включения, прибор автоматически будет производить измерения в выбранной единице измерения.

Инструкции по очистке и дезинфекции:

Очищайте и дезинфицируйте термометр до и после использования без применения агрессивных

моющих средств. Протрите зонд мягкой тканью, смоченной в дезинфицирующем растворе или 70-75%-ном изопропиловом спирте.