

Ветеринарный бесконтактный инфракрасный термометр для собак


Модель: VET-150

Руководство пользователя

Комплект поставки:

1. Руководство пользователя
2. 2 батарейки типа ААА

Внешний вид:

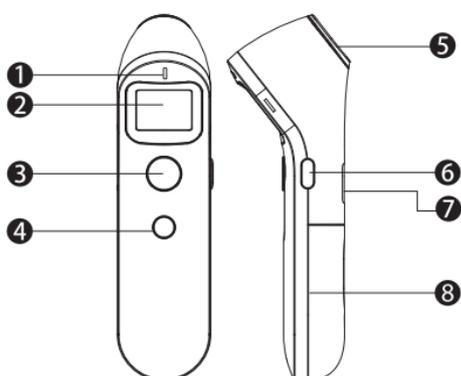


1. Контрольный индикатор
2. ЖК-дисплей
3. Кнопка измерения
4. Кнопка памяти
5. Датчик
6. Кнопка отключения звука
7. Табличка с техническими данными
8. Крышка батарейного отсека

Инструкция:

1. Включение питания
Нажмите кнопку измерения (3) 1 раз. Вы услышите звуковой сигнал, извещающий о том, что питание включено.
2. Измерение температуры
Расположите термометр на расстоянии 3-4 см от тела животного, затем нажмите кнопку считывания температуры (3). Для более точного измерения направьте термометр на ту часть тела, где меньше всего шерсти (живот, лапы или уши).
3. Тихий режим
Нажмите кнопку 6 для включения тихого режима. Будут отключены все звуки. Для включения звуков нажмите кнопку 6 еще раз.
4. Отображение измерений из памяти прибора (до 35)
Когда термометр включен, нажмите кнопку 4 чтобы отобразить последние результаты измерений.

Техническое обслуживание:

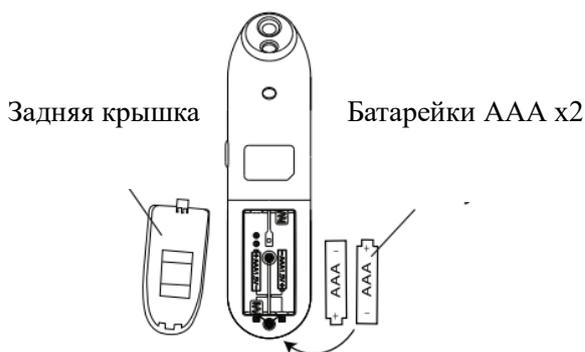

Линза термометра — это самая чувствительная часть прибора. Необходимо держать ее чистой, избегать попадания грязи и жидкости. Если линза загрязнена, не прикасайтесь к ней пальцами. Используйте для очистки салфетку или тампон, смоченную 75% спиртом. Аккуратно удалите загрязнение.

Внимание! Внесение изменений в конструкцию прибора пользователем, его разбор (исключая открытия батарейного отсека) приведет к отказу в гарантийном обслуживании.

Чтобы утилизировать устройство, следуйте приведенным ниже инструкциям:

- Никогда не выбрасывайте использованные батареи/электронику вместе с обычными твердыми отходами, поскольку они содержат токсичные вещества.
- Всегда утилизируйте использованные батареи/электронику в соответствии с действующими общественными правилами.
- Многие продавцы электроники теперь бесплатно перерабатывают батареи и другие электронные компоненты.